



poolpod<sup>®</sup>

Poolpod II  
Tuotetiedot



Poolpod® helpottaa uima-altaaseen menemistä huomattavasti niin, että se onnistuu ilman ulkopuolista apua. Laite on suunniteltu uimareille, joille ei ole apua uima-altaan tikkaista, ja se mahdollistaa entistä paremman uintikokemuksen pyörätuolia käyttäville sekä muille liikuntarajoitteisille henkilöille.

PoolPod on vuoden 2012 Lontoon olympialaisia ja paralympialaisia varten perustetun Olympic Delivery Authority -viranomaisjärjestön kehittämä laite, jonka suunnitteluun myönsi varoja Lontoon Maraton -säätiö (the London Marathon Trust). Laite mahdollistaa itsenäisen uintikokemuksen toimivalla, luotettavalla ja arvokkaalla tavalla.

Uimalaitteistojen uudenaikaistaminen verrattoman Poolpodin avulla ottaa entistä paremmin esille inklusiivisen ja ihmiskeskeisen suunnittelun ja varmistaa, että palvelut ovat aiempaa enemmän lisääntyvän vanhusväestön saatavilla.

**”Tarkastelimme jokaista suunniteltua yksityiskohtaa, kiinnitimme huomiota siihen, miten laitetta käytettiin ja kehitimme tapoja tehdä siitä entistäkin paremman.”**

**Josh Reid, Poolpod Productsin perustaja.**

Poolpod saa virtansa turvallisesta, ladattavasta akusta, joka kestää yhdellä latauksella noin 20 sykliä. Tämän sekä vankan mekaanisen muotoilun ansiosta altaaseen pääsy on nopeaa ja luotettavaa.

Käyttäjä pystyy säätämään nostamista, laskemista ja syvyyttä käyttämällä painikkeetonta, radiotaajuuksista etätunnistamistekniikkaa (RFID) hyödyntävää ranneketta.

Uimarit voivat käyttää Poolpodia yksilöllisesti suunnitellun vedenalaisen pyörätuolin kanssa tai vaihtoehtoisesti jäädä seisomaan laskeutuessaan miellyttävään syvyyteen.




### Arvokas ja itsenäinen

Käyttäjän hallittavissa; ei tarvetta ulkopuoliselle avulle

Altaalta veteen ~20 sekuntia.

Käyttäjä säätää laskemista, nostamista ja syvyyttä RFID-rannekkeen avulla.

Häikäisevä ulkoasu nykyaikaisin loisteliain yksityiskohdin.

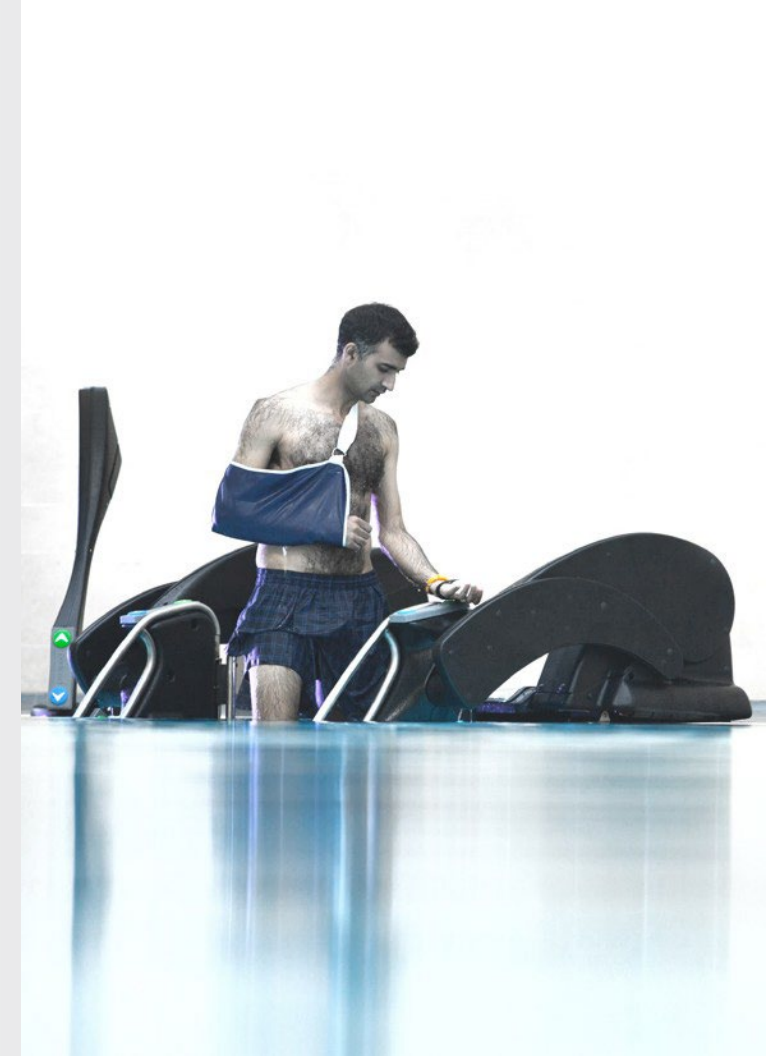

## Ainut vaihtoehto täydelliselle uima-altaalle.

Tämän palkitun ratkaisun avulla uima-altaat voivat houkutella puoleensa liikuntarajoitteisia henkilöitä perheineen ja ystävineen.

Poolpodin avulla palveluntarjoajat voivat täyttää velvollisuutensa syrjintää koskevan lainsäädännön mukaisesti.


Poolpod vapauttaa henkilöstöresursseja verrattuna tavanomaisiin allasnostimiin, joiden käyttöön tarvitaan avustajaa.

Poolpod voi lisätä kassavirtaa, sillä tutkimusten mukaan vammaiset uimarit käyttävät mielellään laitoksia, joissa heidät otetaan huomioon.

### Poolpodin vaihtoehtona ovat perinteiset allasnostimet. Niistä tehdyt tutkimukset osoittavat:

- Nostinten käyttäjät pitävät niitä arveluttavina ja vaarallisina.
- Uimarit kokevat, etteivät voi mennä uimaan ja hakeutuvat muiden harrastusten pariin.
- Nostimet eivät juurikaan innosta käyttäjiä ja niiden käyttäminen on hankalaa.



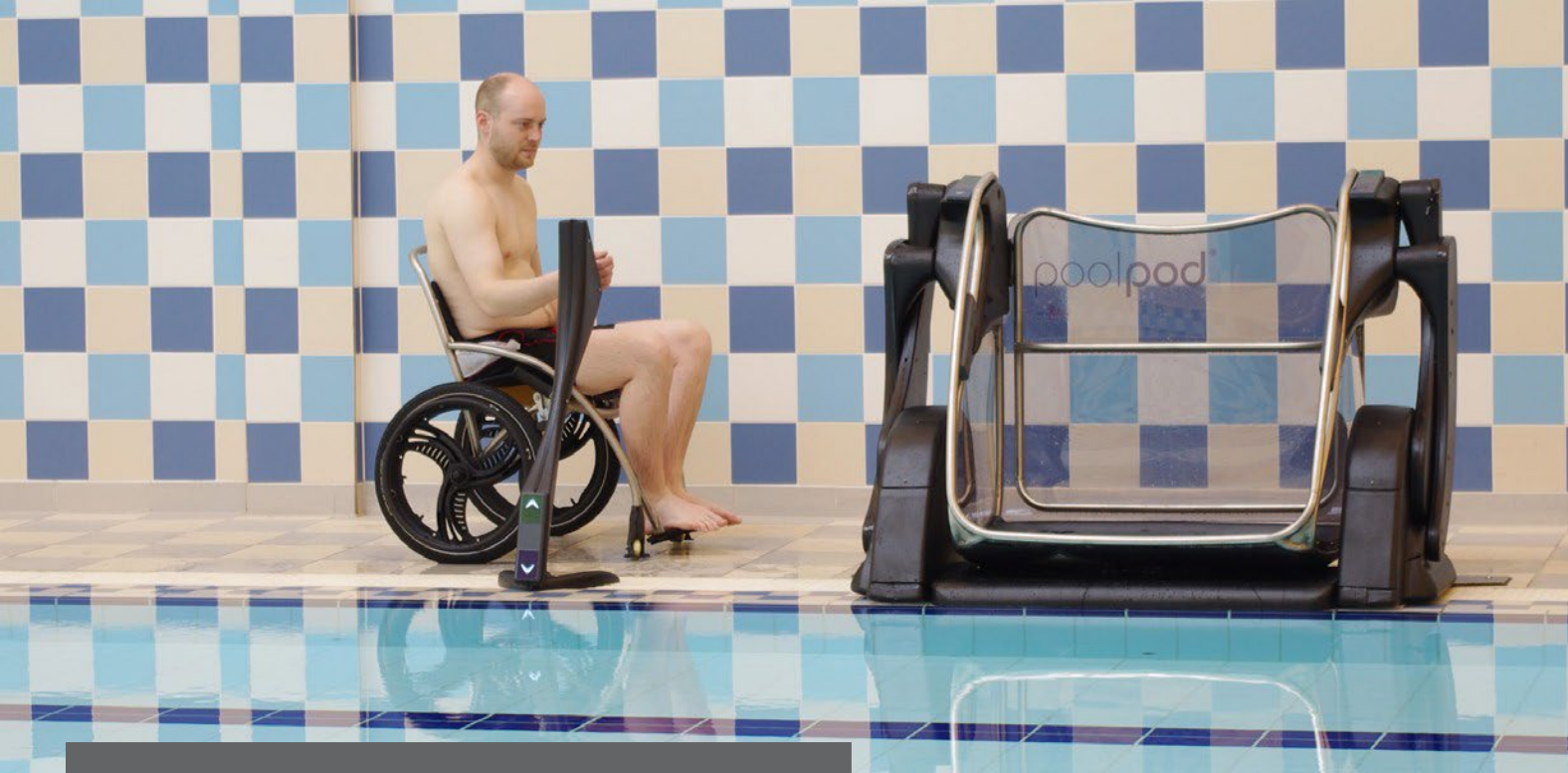

## Poolpod tasehissi

Poolpodin ainutlaatuinen kääntövarsi mahdollistaa tason käyttöönoton yhdellä liikkeellä. Laskeutuminen 0,9 m syvyyteen kestää noin 20 sekuntia.

Hissi liikkuu tasaisesti käytön aikana ja jää altaan ulkopuolelle sen jälkeen.



## Hands-free -toiminto

Poolpodia käytetään RFID-rannekkeella.

Käyttäjät ohjaavat laitetta asettamalla rannekkeensa Poolpodin lasku-/nostosäädinten tai altaan ulkopuolisen ohjausyksikön viereen.

Nousu, lasku ja syvyys määritellään asettamalla tai siirtämällä ranneketta esitettyjen nuolten mukaisesti.

Rannekkeiden käyttö mahdollistaa useita samanaikaisia käyttäjiä sekä Poolpodin valvotun ja turvallisen käytön.



## Vedenalainen pyörätuoli

Poolpodin kanssa yhtä laadukas vedenalainen pyörätuoli mahdollistaa sen, että käyttäjä siirtyy omasta pyörätuolistaan vedenalaiseen pyörätuoliin yksityisessä tilassa.

Pyörätuolit lukittuvat alustaan turvallisesti Poolpodin älykkään pyörähaarukan avulla, jonka käynnistää alustan oven automaattinen sulkujärjestelmä.



## Helppo asentaa

Poolpodin asentamiseen tarvitaan kaksi ankkuria Poolpodiin ja yksi altaan ulkopuoliseen ohjausyksikköön. Ankkurien asentamiseksi altaan ulkopuolelle tulee porata halkaisijaltaan 20 mm ja syvyydeltään 200 mm reiät ja asentaa kiila-ankkurit sekä täyteaineet.

Poolpod kiinnitetään ankkureihin ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla M12-pulteilla.

Allashenkilökunta voi helposti poistaa Poolpodin altaan ulkopuolelta ja siirtää sen sivuun tulevaa käyttöä varten kauko-ohjauksella.

Poolpod-järjestelmään sisältyy henkilökunnan kauko-ohjain, seinälaturiyksikkö sekä kuljetuspyörät.



## Arvokasta, itsenäistä uimista toimivasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Poolpod Products LTD varaa oikeuden tehdä muutoksia tietoihin, materiaaleihin tai lisävarusteisiin ilman erillistä ilmoitusta. Parhaan mahdollisen laadun ylläpitämiseksi tärkeimmät komponentit saattavat tarvita säännöllistä huoltoa. Yksityiskohdat löytyvät käyttöohjeista. Muita takuita kuin erikseen mainittuja ei myönnetä. CorePD Group LTD ei ole vastuussa tahattomista tai tuottamuksellisista vahingoista, riippumatta siitä, olisiko ne voitu estää vai ei, jotka johtuvat tuotteiden puutteista. Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MIKÄLI HALUAT LISÄTIETOA POOLPODISTA TAI MUISTA TUOTTEISTA, OTA YHTEYTTÄ:

# POOL<sup>4</sup>YOU



010 5058 690 | [pool4you@pool4you.fi](mailto:pool4you@pool4you.fi) | [pool4you.fi](http://pool4you.fi)